

MASCHERA SLEEPWEAVER ADVANCE



SLEEPWEAVER ADVANCE, come le altre maschere Circadiance, incorpora la rivoluzionaria tecnologia a panno morbido, che si gonfia in silenzio come un palloncino per creare una chiusura ermetica. Questa maschera traspirante ed anallergica è comoda ed elimina le perdite, i punti di pressione, punti dolenti, e i pizzicorii. **SLEEPWEAVER ADVANCE** offre il massimo in termini di comfort e elimina i segni delle guarizioni. Un nuovo design con copricapo head-gear ampiamente aperto sulla faccia, agevola l'adattamento agli occhiali e permette una visione praticamente totale e senza ostacoli; per chi ama leggere o guardare la TV prima di addormentarsi!

Questa maschera è a taglia unica ed è auto-adattante quasi a qualsiasi volto.



Per i visi che sono troppo piccoli anche per l'adattabilità di **SLEEPWEAVER ADVANCE**, è stata ideata la versione Advance Small: più piccola di circa il 15% e con una tecnologia e un comfort migliorati. Anche questa maschera nasale a taglia unica è auto-adattante, ma ideata appositamente per i volti piccoli. Inoltre, la ridotta dimensione diminuisce la possibilità di perdite.

Le misure disponibili sono:
S - Taglia Unica

MASCHERA SLEEPWEAVER ADVANCE

MATERIALI	
Maschera	Poliestere - Nylon - Elastam
Copricapo	Poliuretano espanso - Nylon - Lycra
Gomito	Policarbonato
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Range di pressione	4 - 20 cmwp
Livello sonoro	26 dbA

CURA E PULIZIA

- Lavare a mano quotidianamente o porre la maschera in lavatrice in un sacchetto "dedicato" e sigillato
- Utilizzare detergente non abrasivo, antibatterico, o ad alto contenuto di olio
- Non usare acqua calda per lavare la maschera
- Risciacquare bene utilizzando acqua potabile
- Appendere la maschera ad asciugare dalla luce solare diretta
- Non usare l'asciugatrice